

INSTRUÇÕES DE USO

ISOTEC BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Barreira Gengival ISOTEC é uma resina fotopolimerizável que não causa irritação nos tecidos gengivais do paciente. Sua formulação possui viscosidade e tixotropia adequadas, permitindo uma cobertura fácil e precisa dos tecidos moles, sem escorrer para áreas indesejadas. Apresenta uma excelente vedação e adere de forma mínima e perfeita à gengiva. A barreira não se solta da gengiva a menos que seja forçada e é removida completamente no momento de retirá-la.

2. APRESENTAÇÃO

Seringa contendo 2,5 g.

3. COMPOSIÇÃO

Monômeros de Uretana Dimetacrilato, Monômeros Metacrilato, Sílica, Pigmento, Fotoiniciadores e Co-iniciadores.

4. INDICAÇÃO DE USO

A Barreira Gengival é indicada como um substituto do lençol de borracha para proteger o tecido gengival durante procedimentos clínicos e em casos de risco de irritação por contato com produtos utilizados, como clareamento dental. Recomendada como coadjuvante no isolamento absoluto para melhor vedação durante preparo cavitário ou tratamento endodôntico.

5. AÇÃO DO PRODUTO

A ação principal do produto é proteger os tecidos moles do contato com o peróxido de hidrogênio (gel clareador WHITECoffice).

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenarem em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Seque a gengiva e os dentes correspondentes à região que se quer proteger;
- Aplique uma fina camada do produto (1-1,5 mm de espessura) sobre a gengiva e papilas gengivais de tal forma que se obtenha total cobertura e um bom campo de proteção para o procedimento que se deseja aplicar;
- Polimerize a resina utilizando 20 a 30 segundos de luz de um fotopolimerizador. Recomenda-se proceder a polimerização

logo após a aplicação da resina para prevenir qualquer eventual irritação;

- Verifique se o produto cobre toda a superfície da gengiva e se está completamente polimerizado. Para observar a parte posterior de papilas e gengiva utilize um espelho clínico olhando de incisal para cervical. Evite testá-la forçando ou tentando erguê-la porque isto pode ocasionar infiltração da substância irritante;
- Para remoção do produto basta destaca-la para frente. Esta deve se soltar facilmente por inteiro ou em pedaços grandes.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- O produto tem monômeros de metacrilato que podem causar reações alérgicas ou irritações leves a pacientes sensíveis a estas substâncias;
- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

9. ADVERTÊNCIAS

- A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos efeitos colaterais.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Evite aplicar o produto na gengiva do paciente que tenha passado recentemente por algum tipo de procedimento cirúrgico bucal ou que tenha qualquer tipo de irritação gengival.

11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

