

## INSTRUÇÕES DE USO

### CAITHEC CIMENTO RESINOSO DUAL UNIVERSAL

#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Cimento Resinoso Dual CAITHEC é apresentado na forma de duas pastas (pasta catalizadora e pasta base), possui esse nome pois é após misturado pode polimerizar de forma química (interação entre o peróxido de dibenzoila e a amina – DHET) e por foto ativação utilizando o sistema de fotopolimerização (LED ou halógeno). Esse produto é utilizado para aderir restaurações indiretas a estrutura dentária, pode ser utilizado em inlays, onlays, coroas e pontes. O produto é apresentado em apenas uma cor universal.

#### 2. APRESENTAÇÃO

1 (uma) seringa contendo 3 g de Base;  
1 (uma) seringa contendo 3 g de Catalizador.

#### 3. COMPOSIÇÃO

**Catalizador:** Monômeros dodecanediol, Carga Inerte, Iniciador;

**Base:** Monômeros dimetracrilato, Sílica, Fotoiniciador, Co-iniciador, Carga e Amina.

#### 4. INDICAÇÃO DE USO

Cimentação definitiva de Coroas e pontes de porcelana puras ou fundidas a partes de metais preciosos, semipreciosos ou não preciosos (metalocerâmicas), Inlays, onlays e overlays em porcelana ou resina composta, Pinos radiculares de fibra de vidro, cerâmicos ou metálicos.

#### 5. AÇÃO DO PRODUTO

O Cimento Resinoso Dual CAITHEC é classificado como um produto médico invasivo, não cirúrgico, aplicável através de um dos orifícios do corpo (meio bucal) de uso prolongado, permanecendo mais de 60 minutos em contato com o meio.

#### 6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

#### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Realizar isolamento do dente e utilizando a técnica adequada;
- Lavar e secar (secagem isenta de óleo) o local aonde será utilizado o cimento;
- Condicionar cuidadosamente o esmalte e a dentina durante 20 segundo com gel de ácido fosfórico 37% ATACKTEC;
- Remova o gel com um vigoroso spray de água. Enxaguar por no mínimo 10 s. Secar o preparo ligeiramente com ar ou com bolinhas de algodão;
- Aplicar uma camada uniforme do sistema adesivo dentinário CAITHEC com um pincel ou microaplicador e proceder a fotoativação conforme instruções de uso;

- O cimento resinoso CAITHEC não é compatível com adesivos autocondicionantes de passo único;
- Dispensar a quantidade necessária do cimento sobre o bloco de espatulação na proporção 1:1 e misturar as pastas durante 10 segundos com espátula de plástico ou com a ponta misturadora descartável;
- Aplicar uma camada fina e homogênea do cimento resinoso dual CAITHEC na superfície interna da restauração ou sobre as paredes internas do preparo cavitário;
- Posicionar a peça protética, ou o pino na camada de cimento pressionando levemente para retirar o excesso de cimento;
- Fotopolimerizar por 40 segundos para garantir a fixação das peças, lembrando que a cura química pode levar até 10 minutos para acontecer totalmente;
- Informar ao paciente para evitar forças excessivas durante pelos menos 20 minutos após o procedimento.

#### 8. CONTRA INDICAÇÕES

- Evite aplicar o produto na gengiva do paciente que tenha passado recentemente por algum tipo de procedimento cirúrgico bucal ou que tenha qualquer tipo de irritação gengival;
- A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos.

#### 9. ADVERTÊNCIAS

- O produto tem monômeros de metacrilato que podem causar reações alérgicas ou irritações leves a pacientes sensíveis a estas substâncias.

#### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Suspenda o uso do produto em caso de reações alérgicas.

#### 11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

#### 12. INTERAÇÕES

- Não há.

