

INSTRUÇÕES DE USO

DIAMONDTEC PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Pasta de Polimento Diamantada DIAMONDTEC é uma pasta universal, contendo diamante micronizado de granulação extrafina, utilizada para acabamento final em resinas e para remoção de manchas superficiais após o tratamento de clareamento dental. Proporciona excelentes resultados no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Sua fórmula solúvel em água facilita a lubrificação durante o processo de polimento e remoção da pasta. Possui alta dureza, resistência e viscosidade ideal para o trabalho profissional.

2. APRESENTAÇÃO

Seringa contendo 2,5 g.

3. COMPOSIÇÃO

Pó de diamante, Fluoreto de sódio, Glicerina Vegetal Bidestilada, Hidróxido de Sódio, Carbômero e Água purificada.

4. INDICAÇÃO DE USO

A Pasta de Polimento Diamantada DIAMONDTEC é indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento final de superfícies de materiais restauradores em geral.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores.

6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Prepare a região a ser polida deixando-a lisa e no formato final desejado;

- Se necessário, utilize discos de lixa ou pasta de granulação média para acabamento prévio ao polimento;
- Esta etapa é de fundamental importância, pois a obtenção de brilho tem forte dependência da condição inicial da superfície;
- Deposite uma pequena quantidade de pasta sobre um disco de feltro ou diretamente sobre a superfície da peça e proceda o polimento;
- repita os procedimentos, se necessário, até obter o efeito desejado.

Notas:

a. Utilize baixa rotação e movimentos intermitentes com baixa pressão de aplicação do feltro sobre o dente. Desta forma previne-se o aquecimento da superfície.

b. Utilize sempre feltros novos para executar um polimento. A contaminação de feltros com abrasivos de outras pastas pode comprometer o sucesso do polimento.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, evitando-se assim o aquecimento excessivo da superfície dental.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional.

11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

