

INSTRUÇÕES DE USO

WHITEC PLACA PARA MOLDEIRA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Placa para moldeira WHITEC odontológicas, fabricadas em EVA, são indicadas para a confecção de férulas ou moldeiras, também chamadas de moldes ou talas dentárias ortodônticas.

2. APRESENTAÇÃO

Em formato redondas e quadradas
Três espessuras - 1mm, 2mm e 3mm.

3. COMPOSIÇÃO

Copolímero de etileno e acetato de vinil.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicadas para a confecção de moldeiras para clareamento dental controle de bruxismo, ou então como protetores bucais ou tala para tratamentos dentários.

5. AÇÃO DO PRODUTO

Para a confecção de moldeiras.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Moldar a arcada do paciente;
- Preencher o molde com gesso, obtendo o modelo;
- A confecção de aliviar na moldeira é opcional;
- Acomodar a placa de EVA na plastificadora a vácuo;
- Posicionar o modelo de gesso centralizado sob a placa e ligar a plastificadora para iniciar o aquecimento da placa;
- Quando a placa apresentar um abaulamento evidenciando seu amolecimento, abaixá-la rapidamente sobre o modelo e ligar o vácuo entre 10 e 15 segundos;
- A placa se ajustará aos contornos do modelo;
- Após resfriamento da moldeira, recorte o excesso de material.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Durante o processo de moldagem as placas podem apresentar-se quentes e provocar queimaduras na pele se tocadas;
- Evite tocar nas placas durante ou logo após o processo;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada;
- Não expor o produto ao calor excessivo.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto fora do prazo de validade;
- Produto de uso único, podendo ser moldado uma única vez;
- Em caso de anomalia na moldagem descartar o produto;
- Produto não estéril;
- Produto de uso restrito a profissionais do ramo odontológico (cirurgiões-dentistas e técnicos em próteses dentárias).

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Manter o produto fora do alcance de crianças.

11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

