

## INSTRUÇÕES DE USO

### WHITEChome CLAREADOR DENTAL CASEIRO

#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Clareador Dental Caseiro WHITEChome é um produto desenvolvido para o clareamento de dentes vitais, para uso caseiro. Com concentrações de 10%, 16% e 22% de Peróxido de Carbamida, o clareamento dental é efetivo, uma vez que o peróxido de carbamida se decompõe em peróxido de hidrogênio, que penetra nos poros dos dentes e oxida os pigmentos responsáveis pelo escurecimento. O gel de Carbomer de alta viscosidade garante uma aplicação precisa, evitando vazamentos da moldeira. Com pH neutro, o Clareador Dental Caseiro WHITEChome não provoca descalcificação do esmalte e da dentina. Sua fórmula contém umectantes e alto teor de água para prevenir a desidratação dental. O produto apresenta uma combinação de Nitrato de Potássio e Fluoreto de Sódio como agentes dessensibilizantes, minimizando ao máximo a sensibilidade dental durante o clareamento.

#### 2. APRESENTAÇÃO

Seringa contendo 3g de Clareador Dental Caseiro WHITEChome nas concentrações 10%, 16% ou 22%.

#### 3. COMPOSIÇÃO

Peróxido de Carbamida, Agente Neutralizante, Espessante, Remineralizante, Estruturante, Agentes Dessensibilizantes e Água purificada.

#### 4. INDICAÇÃO DE USO

O Clareador Dental Caseiro WHITEChome é indicado para uso caseiro, seguindo a técnica de clareamento dental supervisionada pelo dentista. É efetivo no clareamento de dentes vitais, removendo manchas causadas por fatores congênitos, sistêmicos, farmacológicos, traumáticos e relacionadas ao envelhecimento. Proporciona excelentes resultados no tratamento de manchas decorrentes de fluorose, especialmente as manchas marrom. Também é recomendado para manchas de Tetraciclina de primeiro e segundo grau.

O Clareador Dental Caseiro WHITEChome, com concentração de 10%, é indicado para manchas naturais relacionadas à idade, fumo ou quando há maior sensibilidade dental. Já as concentrações de 16% e 22% são recomendadas para manchas mais antigas e acentuadas, que possuem remoção desafiadora ou quando se busca resultados mais rápidos.

#### 5. AÇÃO DO PRODUTO

O Clareador Dental Caseiro WHITEChome tem a ação dos agentes clareadores penetrando nas estruturas dentárias e sua reação com as moléculas pigmentadas, oxidando e fracionando em cadeias moleculares cada vez menores, fazendo com que os pigmentos incorporados aos tecidos

sejam totais ou parcialmente eliminados da estrutura dental por difusão.

#### 6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar o produto em temperaturas de 5°C a 28°C;
- E não congelar o produto ou deixar exposto a altas temperaturas.

#### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

Inicialmente é recomendável um profissional dentista realizar uma profilaxia e registrar a cor dos dentes do paciente, por meio fotográfico ou de uma escala de cores Vitta. Antes de cada aplicação do produto, efetuar a completa e efetiva higiene dos dentes com escova e fio dental, evitando a escovação agressiva sobre a gengiva. Os resíduos alimentares podem comprometer o resultado do clareamento.

a. Preparada e higienizada a moldeira WHITEC, remova a tampa da seringa e acoplar a ponta aplicadora, para colocar de uma a três gotas de gel clareador WHITEChome em cada compartimento da moldeira referente aos dentes que serão clareados.

b. Após isto a moldeira WHITEC deverá ser posicionada na boca, de modo que os dentes entrem em contato com o gel. Eventual excesso de gel deverá ser removido.


c. Leve as moldeiras WHITEC, uma a uma, à boca e pressione-as com o auxílio dos dedos polegar e indicador contra os dentes para que o gel se espalhe e cubra todos eles.

d. Remova os excessos do gel com a ajuda do dedo indicador. Após usar da moldeira WHITEC carregada com o gel pelo tempo recomendado (de ½ hora à 2 horas diárias, ou o tempo recomendado pelo dentista), retire a moldeira WHITEC.

e. Limpe a moldeira WHITEC com o auxílio da escova dental e água corrente. Seque e guarde a moldeira WHITEC em local adequado.

f. Enxágue a boca com água e, se julgar necessário, escove os dentes novamente.

g. Após a remoção da moldeira WHITEC, esta deverá ser limpa com atenção e guardada com a abertura dos compartimentos dos dentes para baixo, para não reter água. Este produto pode ser usado durante o dia, desde que não seja imediatamente seguido de refeição. Neste caso, o produto deverá permanecer em contato com os dentes entre 1 e 2 horas. Outra opção é deixá-lo agir durante o sono, período de aproximadamente 8 horas.

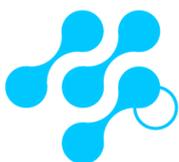

## INSTRUÇÕES DE USO

### WHITEChome CLAREADOR DENTAL CASEIRO

Nos dois casos, recomenda-se o uso contínuo do gel clareador entre 15 e 21 dias, com supervisão do dentista. Cuidado especial deve ser tomado para não se mastigar ou ingerir enquanto a moldeira estiver na boca.

#### 8. CONTRA INDICAÇÕES

- Não utilizar o líquido isoladamente;
- Este é um produto que deve ser sempre indicado e supervisionado por um dentista;
- Antes do início do tratamento, informe seu paciente sobre a possibilidade de ocorrer sensibilidade dental;
- O produto não deve ser usado por grávidas e/ou lactantes e em pacientes menores de 14 anos;
- Evite a ingestão proposital e excessiva do produto;
- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto. Pacientes com históricos alérgicos aos componentes desta formulação devem consultar um especialista antes de iniciar o tratamento;
- Evite fumar durante o período do tratamento e não fume imediatamente depois de retirada a moldeira;
- Durante o tratamento o paciente deverá evitar a ingestão de bebidas, frutas e produtos ácidos, assim evitará a sensibilidade;
- Evite consumir, durante o tratamento, produtos que contenham corantes fortes como: café, chocolate, refrigerantes, vinhos, beterraba etc., com o intuito de não comprometer o processo do clareamento;
- Aconselhe a seu paciente retornar ao consultório para acompanhamento do tratamento após uma semana (7dias), com o intuito de avaliar e garantir a efetividade dos resultados do clareamento dental até o final do tratamento;
- Se ocorrer algum problema, interrompa o tratamento e comunique ao seu dentista;
- Se um grande volume de produto for ingerido acidentalmente, procure ajuda médica;
- Produto não injetável. Não reutilize a embalagem.

#### 9. EFEITOS COLATERAIS

- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas;

- Antes do início do tratamento, informe seu paciente sobre a possibilidade de ocorrer sensibilidade dental. Normalmente é comum ocorrer sensibilidade dental durante o tratamento do clareamento dental;
- Neste caso se persistir a sensibilidade trate os dentes com o gel dessensibilizante SENSITEC 0,2% indicado para sensibilidade moderada a baixa ou gel dessensibilizante SENSITEC 2% indicado para sensibilidade moderada a alta;
- Excesso de gel na moldeira pode deixar uma leve irritação no tecido gengival, por isso, remova sempre o excesso conforme manual de instruções do paciente.

#### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

#### 11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

#### 12. INTERAÇÕES

- Não há.

