

## INSTRUÇÕES DE USO

### CAVITEC OBTURADOR TEMPORÁRIO

#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Obturador Temporário CAVITEC é um produto utilizado para isolamento temporário de cavidades em tratamentos restauradores e endodônticos. Quando em contato com a saliva do paciente a pasta endurece e sela a cavidade, evitando o contato do local com o meio bucal, porém possui fácil remoção quando necessário.

#### 2. APRESENTAÇÃO

Pote com 25g

#### 3. COMPOSIÇÃO

Óxido de Zinco, Sulfato de Cálcio e Silicone.

#### 4. INDICAÇÃO DE USO

O produto é indicado para isolamento temporário de cavidades em tratamentos restauradores e endodônticos.

#### 5. AÇÃO DO PRODUTO

O Obturador Temporário CAVITEC apresenta adesão às paredes da cavidade e um vedamento marginal satisfatório, sendo de suma importância durante os procedimentos endodônticos, em especial quando se realiza o curativo de demora e após obturações dos canais radiculares. Previne a microinfiltração por fluídos orgânicos e bactérias do meio bucal e também a passagem de medicamentos intracanaís do interior da câmara pulpar para o ambiente bucal.

#### 6. CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

#### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Aplicar a quantidade desejada no local a ser restaurado provisoriamente, com auxílio de uma espátula;
- O local deve estar limpo e seco;
- Tempo de pega: 3-5 minutos e de cura: 15-30 minutos.

#### 8. CONTRA INDICAÇÕES:

- Não permitir que o produto entre em contato com os olhos e pele;
- Caso entre em contato com a pele ou o olho, lavar com água em abundância e não esfregar (procurar um médico imediatamente);
- Produto apenas para utilização profissional, manter longe de quem não possua treinamento adequado;

#### 9. ADVERTÊNCIAS

- Produto de uso exclusivamente profissional;
- Não contém Eugenol;
- Não utilizar como cimento restaurador definitivo;
- Fácil remoção.

#### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Manter longe das crianças.

#### 11. MANIPULAÇÃO

- O dentista deverá utilizar luvas e óculos de proteção durante a aplicação do produto.

#### 12. INTERAÇÕES

- Não há.

