

## INSTRUÇÕES DE USO

### CAITHEC FLÚOR EM GEL

#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Flúor em gel CAITHEC é utilizado após o procedimento de assepsia dental realizada em consultório, sua principal função é liberar flúor ajudando no processo de remineralização do tecido dental.

#### 2. APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 200 mL

#### 3. COMPOSIÇÃO

Fluoreto de Sódio, Carbômero, Glicerina Bidestilada, Sacarina Sódica, Propilenoglicol, Aroma, Corante azul, Água purificada.

#### 4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para a prevenção de cáries, Flúor gel CAITHEC acidulado de rápida aplicação. Além de segura, sua aplicação é muito prática. Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais.

#### 5. AÇÃO DO PRODUTO

Atua abrاندando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte.

#### 6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C.

#### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Após realização da limpeza secar bem os dentes e aplicar o gel com o auxílio de uma moldeira;
- Deixar a moldeira WHITEC em contato com a superfície dental por pelo menos 40 segundos evitando que o paciente engula o produto (utilizar o sugador se necessário);
- Remover a moldeira WHITEC e o excesso de gel e solicitar para o

paciente cuspir o residual que ficar na boca.

- Instruir o paciente para não comer e beber nada por pelo menos 30 minutos após a aplicação.

#### 8. CONTRA INDICAÇÕES

- Evite a ingestão proposital e excessiva do produto;
- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto;
- Se ocorrer algum problema durante ou após a aplicação, comunique ao seu dentista;
- Mantenha sempre afastado do calor e/ou luz solar;
- Se um grande volume de produto for ingerido acidentalmente, procure ajuda médica;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem.

#### 9. ADVERTÊNCIAS

- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas;
- Sempre ler as instruções de uso antes de utilizar o produto;
- Apenas para uso profissional.

#### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas;
- Por se tratar de um produto composto por fluoreto, o mesmo não deve ser ingerido.

#### 11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

#### 12. INTERAÇÕES

- Não há.

