

INSTRUÇÕES DE USO

SENSITEC DESSENSIBILIZANTE DENTAL

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Dessensibilizante Dental SENSITEC é um gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio, é utilizado para estabilizar a câmara pulpar quimicamente. Sua ação se baseia no aumento da concentração de potássio extracelular, que despolariza as membranas das fibras nervosas, bloqueando a passagem do estímulo e reduzindo a hipersensibilidade. Sua baixa viscosidade permite uma aplicação precisa e fácil.

2. APRESENTAÇÃO

a. Dessensibilizante Dental SENSITEC de 0,2%

Seringas contendo 3 g.

b. Dessensibilizante Dental SENSITEC 2%

Seringas contendo 3 g.

3. COMPOSIÇÃO

Nitrato de Potássio, Fluoreto de Sódio, Água purificada, Glicerina e espessante.

4. INDICAÇÃO DE USO

O Dessensibilizante Dental SENSITEC é indicado para o tratamento da sensibilidade dental em diferentes níveis, desde baixa até alta sensibilidade. Foi desenvolvido especialmente para aliviar a sensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos. Também é recomendado no tratamento da sensibilidade que pode surgir após procedimentos de clareamento dental.

5. AÇÃO DO PRODUTO

É indicado para utilização antes, durante e depois do clareamento dental e quando a sensibilidade for significativa.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C.

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Limpe a superfície dos dentes eliminando placa, cálculo e outros depósitos que possam impedir a penetração do produto nos dentes;
- Aplique o gel dessensibilizante uniformemente sobre os dentes aguarde um tempo mínimo de 10 minutos;
- Alternativamente o gel pode ser aplicado com auxílio da moldeira de clareamento

WHITEC fazendo a aplicação como se fosse o próprio clareador;

- Decorrido o tempo de aplicação, remova o gel dos dentes com algodão e água em abundância. Evite que o paciente degluta o dessensibilizante;
- Repita a aplicação do dessensibilizante conforme a necessidade ou no caso de clareamento dental acompanhando o tempo do tratamento. O número de aplicações não deve exceder uma vez ao dia.

Nota: Decorrido o tempo de aplicação do dessensibilizante e com este ainda sobre os dentes sugere-se friccionar o produto com microaplicador, escova ou discos de feltro em baixa rotação e movimentos circulares intermitentes (baixa pressão). Este procedimento auxilia mecanicamente a penetração do agente dessensibilizante no dente melhorando assim sua performance.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Evite a ingestão proposital e excessiva do produto;
- Se ocorrer algum problema durante ou após a aplicação, comunique ao seu dentista;
- Produto não injetável;
- Não reutilize a embalagem.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Se um grande volume de produto for ingerido acidentalmente, procure ajuda médica.

11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

