

INSTRUÇÕES DE USO

ATAKTEC CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37%

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Ácido ATACKTEC 37% é um gel condicionador à base de ácido fosfórico de viscosidade baixa, com propriedade tixotrópica. Possui corante azul para facilitar a visualização e controle durante a aplicação. É hidrofílico e removido facilmente após o condicionamento. Não escorre do local aplicado.

2. APRESENTAÇÃO

Seringa contendo 2,5 mL

3. COMPOSIÇÃO

Ácido Fosfórico, Polietilenoglicol, Água purificada e Corante Azul.

4. INDICAÇÃO DE USO

Indicado para esmalte e dentina, o condicionador Ácido 37%, além limpar a superfície dental promove o aumento da área de superfície proporcionando melhor adesão e retenção dos sistemas adesivos na superfície dental.

5. AÇÃO DO PRODUTO

Ácido é um gel que contém Ácido Fosfórico na concentração de 37%, o qual reage com a superfície do esmalte ou dentina formando sais solúveis de Fosfato de Cálcio. Estes Fosfatos solúveis são removidos e assim a superfície fica isenta de partículas soltas ou adsorvidas, apresentando-se como um relevo mais rugoso (especialmente no caso da dentina, onde os túbulos dentinários são desobstruídos e expostos). A limpeza associada às condições de rugosidade permite melhorar o comportamento dos adesivos da superfície condicionada. Com a superfície limpa e bem exposta, o adesivo penetra mais facilmente.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;

- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Promover a profilaxia, lavar e secar bem a região a ser condicionada;
- Aplicar o Ácido na região a ser condicionada e deixe agir por 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina;
- Dentes fluoretados podem necessitar de segunda aplicação;
- Após o condicionamento, lavar a superfície com água em abundância e em seguida secar com jatos de ar suaves isentos de óleo.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

9. ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar com prazo de validade vencido;
- Manter fora do alcance de crianças;
- Uso exclusivo do cirurgião dentista.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Evitar o contato com pele, tecidos orais e olhos, caso isso ocorra lave imediatamente com água corrente.

11. MANIPULAÇÃO

- Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;
- Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

