

## INSTRUÇÕES DE USO

### CAITHEC CIMENTO DE BRAQUETE

#### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Cimento de Braquete CAITHEC é uma resina polimerizável de dois passos (primer e bond unificados) para aderir os braquetes (metal, cerâmico ou polimérico) na superfície do esmalte dental durante o tratamento ortodôntico.

#### 2. APRESENTAÇÃO

Seringa contendo 3 g

#### 3. COMPOSIÇÃO

Monômero metacrilato, Carga inerte, Fluoreto de Sódio, Fotoiniciador, Co-iniciador.

#### 4. INDICAÇÃO DE USO

O Cimento de Braquete CAITHEC é indicado para colagem de braquetes na superfície do esmalte dental.

#### 5. AÇÃO DO PRODUTO

O Cimento de Braquete CAITHEC um produto médico invasivo, não cirúrgico, aplicável através de um dos orifícios do corpo (meio bucal) de uso prolongado, permanecendo mais de 60 minutos em contato com o meio.

#### 6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar em local seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

#### 7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Limpar a superfície dental com pasta abrasiva e lavar com água em abundância;
- Isolar (absoluto ou relativo) o local aonde o braquete será colado com o auxílio de um afastador labial;
- Realizar o condicionamento ácido ATACKTEC no local a ser aplicado o produto (30 segundos);
- Lave o local com água em abundância e seque a superfície onde o cimento será aplicado;
- Dispensar o cimento diretamente sobre a base do braquete e posicionar o braquete na superfície onde ele será aderido fazendo compressão;

- Remova os excessos com auxílio de uma sonda sem mover o braquete da posição;
- Fotopolimerizar cada braquete por pelo menos 20 segundos;
- O arco pode ser instalado logo após o processo de polimerização;

**Nota:** utilize sempre uma fina camada de cimento entre a superfície dental e o braquete, garantindo assim uma melhor eficiência adesiva.

#### 8. CONTRA INDICAÇÕES

- A incompleta polimerização do produto ou o tempo excessivo podem levar a uma leve irritação gengival em alguns casos;
- O produto tem monômeros de metacrilato que podem causar reações alérgicas ou irritações leves a pacientes sensíveis a estas substâncias;
- Não exponha o material a temperaturas elevadas ou à luz intensa.

#### 9. ADVERTÊNCIAS

- Produto para uso profissional;
- Utilize luvas para manipular o produto.

#### 10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas;
- Evite o contato com a pele e olhos.

#### 11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

#### 12. INTERAÇÕES

- Não há.

