

INSTRUÇÕES DE USO

WHITECoffice CLAREADOR DE CONSULTÓRIO 35%

21. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Clareador Dental de Consultório 35% WHITECoffice é um sistema profissional de clareamento dental à base de Peróxido de Hidrogênio 35%, exclusivamente para uso em consultórios odontológicos. Este produto oferece um tempo de tratamento reduzido, pois é aplicado em uma única sessão. Após a mistura das duas fases, forma-se um gel homogêneo contendo Peróxido de Hidrogênio a 35%, com pH entre 6.0 e 7.0. O pH neutro evita e reduz efeitos desmineralização do esmalte ou sensibilidade dentária. O Clareador Dental de Consultório 35% WHITECoffice contém agentes dessensibilizantes em sua fórmula, proporcionando máximo conforto ao paciente durante o procedimento. É fundamental utilizar um sistema de isolamento eficiente para proteger a gengiva durante a aplicação.

2. APRESENTAÇÃO

Caixa com 1 (um) kit de Clareador Dental de Consultório 35% WHITECoffice:

- 1 Seringa de peróxido de hidrogênio contendo 1,2g;
- 1 Seringa de espessante 0,4g;
- 1 Conector.

3. COMPOSIÇÃO

Peróxido de hidrogênio, Fluoreto de sódio, Estabilizante, Agente Neutralizante, Espessante, Estruturante, Pigmento azul e Água purificada.

4. INDICAÇÃO DE USO

O Clareador Dental de Consultório 35% WHITECoffice é indicado para o clareamento de dentes vitais e não vitais que apresentem alterações de cor extrínsecas crônicas e escurecimento que não podem ser removidos por procedimentos convencionais. Este produto é de uso exclusivo em consultórios odontológicos. O clareador é compatível com fontes de energia luminosa de cor azul.

5. AÇÃO DO PRODUTO

O Clareador Dental de Consultório 35% WHITECoffice tem a ação dos agentes clareadores penetrando nas estruturas dentárias e sua reação com as moléculas pigmentadas, oxidando e fracionando em cadeias moleculares cada vez menores, fazendo com que os pigmentos incorporados aos tecidos sejam totais ou parcialmente eliminados da estrutura dental por difusão.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO


- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazenar o produto em temperaturas de 5°C a 28°C;
- Não congelar o produto ou deixar exposto a altas temperaturas.

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Realize a limpeza dos dentes, após isto registre a cor inicial através de escala da Vita ou fotografia;
- Seque bem os dentes e realize um cuidadoso isolamento relativo com barreira gengival fotopolimerizável ISOTEC contornando o tecido gengival e fotopolimerize por 10 segundos cada dente a ser clareado;
- Conecte as duas seringas do Kit do Clareador Dental de Consultório 35% WHITECoffice, após o acoplamento completo e seguro misture empurrando os êmbolos alternadamente por até 10 vezes ou até apresentar uma mistura homogênea, abaixo explicação do sistema de automistura.

SISTEMA DE AUTOMISTURA

O sistema de automistura é utilizado para facilitar a mistura do peróxido com o espessante, onde são utilizadas duas seringas conectadas por um sistema que permite que o gel passe de uma seringa para a outra efetivando a mistura das duas fases. Após a mistura deve-se colocar o gel misturado em apenas uma seringa e utilizar. A Figura 01 apresenta uma ilustração esquemática do funcionamento de automistura.

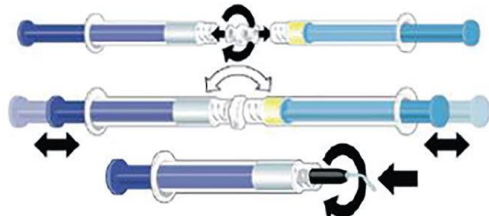

- Inicie a aplicação do gel clareador já misturado em toda a face vestibular e proximais de cada dente a ser clareado. A camada de gel deverá ter 1mm de espessura;
- O gel clareador misturado deverá permanecer sobre os dentes até 30 minutos. Necessitando liberar eventuais bolhas de oxigênio utilize um pincel descartável. Caso o paciente relate sensibilidade remova o produto e avalie o motivo (trinca, infiltração, dentina exposta, etc);
- Após 30 minutos remova o gel clareador aspirando com uma ponta sugadora apropriada e lave abundantemente com água;
- Remova a barreira gengival fotopolimerizável ISOTEC destacando com sonda exploradora. Aplique o dessensibilizante dental por 10 minutos.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Promover uma anamnese detalhada do paciente antes de iniciar o tratamento;
- Manipular o produto apenas em um consultório odontológico, utilizando luvas e óculos de proteção;
- Evitar o contato do gel com tecidos moles e gengiva;
- O produto não é recomendado para pessoas que tenham feito recentemente cirurgia de gengiva ou com inflamação do tecido gengival e pessoas com alergia a qualquer um de seus componentes;
- Não é recomendado o uso durante a gravidez, lactação e menos de 15 anos;
- Produto de uso exclusivo em consultório odontológico sob supervisão de um profissional;
- Produto não estéril;
- Ler as instruções de uso antes de utilizar o produto;
- Não utilizar após a data de validade;
- Recomenda-se que o paciente utilize óculos de proteção.

9. EFEITOS COLATERAIS

- A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas;
- Antes do início do tratamento, informe seu paciente sobre a possibilidade de ocorrer sensibilidade dental. Normalmente é comum ocorrer sensibilidade dental durante o tratamento do clareamento;
- Neste caso, se persistir a sensibilidade trate os dentes com o gel Dessensibilizante Dental SENSITEC 2% que é indicado para sensibilidade moderada a alta;
- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Não ingerir e evitar o contato com olhos, pele e tecidos orais.

11. MANIPULAÇÃO

- Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;
- Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

