

INSTRUÇÕES DE USO

CAITHEC PASTA PROFILÁTICA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Pasta Profilática CAITHEC é uma pasta odontológica abrasiva com ação antisséptica e branqueadora que pode ser utilizada na profilaxia dental, pois não interfere com o condicionamento ácido.

2. APRESENTAÇÃO

Bisnaga contendo 90 g

3. COMPOSIÇÃO

Carbonato de Cálcio, Quartzo, Sulfato de Sódio, Sílica, Espessante, Adoçante, conservante, Aroma, Água purificada, Glicerina, Fluoreto de sódio.

4. INDICAÇÃO DE USO

Pasta profilática CAITHEC é indicada para procedimentos de profilaxia, auxiliando na remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental.

5. AÇÃO DO PRODUTO

A pasta profilática CAITHEC é classificada como um produto médico invasivo aplicável ao orifício do corpo (meio bucal) de uso transitório.

6. CONSERVAÇÃO/ ARMAZENAMENTO

- Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;
- Proteger da incidência da luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C.

7. INSTRUÇÕES PARA USO

- Aplicar pequena quantidade da Pasta Profilática CAITHEC com a taça de borracha na superfície dos dentes, utilizando baixa rotação até completa remoção das manchas e placas;
- Em seguida enxaguar.

8. CONTRA INDICAÇÕES

- Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, evitando-se assim o

aquecimento excessivo da superfície dental;

- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto;
- Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

9. ADVERTÊNCIAS

- Utilização restrita de profissionais especializados em odontologia, conforme legislação local;
- Seguir rigorosamente os procedimentos fornecidos nas Instruções de Uso;
- Durante o procedimento deve se tomar cuidado com a abrasão excessiva de qualquer material restaurador presente, pois estes são suscetíveis ao desgaste devido a sua baixa dureza;
- Aplicar com cuidado nas áreas com dentina exposta;
- O uso diário do produto pode causar o desgaste do esmalte;
- O uso em crianças menores de 2 anos pode acarretar em fluorose dental, devido a ingestão acidental desse produto;
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade;
- Manter longe do alcance de crianças.

10. CUIDADOS ESPECIAIS

- Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional.

11. MANIPULAÇÃO

- Ambiente asséptico.

12. INTERAÇÕES

- Não há.

