

INSTRUCCIONES DE USO

WHITECoffice BLANQUEAMIENTO EN CONSULTORIO 35%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Blanqueador Dental de consultorio 35% WHITECoffice es un sistema profesional de blanqueamiento dental a base de peróxido de hidrógeno al 35%, de uso exclusivo en consultorios dentales. Este producto permite reducir el tiempo de tratamiento, ya que se aplica en una sola sesión. Tras mezclar las dos fases, se forma un gel homogéneo que contiene Peróxido de Hidrógeno al 35%, con un pH entre 6,0 y 7,0. El pH neutro previene y reduce los efectos de desmineralización del esmalte o sensibilidad dental. El Blanqueador Dental de Consultorio 35% WHITECoffice contiene agentes desensibilizantes en su fórmula, proporcionando el máximo confort al paciente durante el procedimiento. Es esencial utilizar un sistema de aislamiento eficaz para proteger las encías durante la aplicación.

2. PRESENTACIÓN

Caja con 1 (un) Kit de Blanqueador Dental de Consultorio 35% WHITECoffice:

- 1 Jeringa de peróxido de hidrógeno de 1,2g.
- 1 Jeringa de espesante 0,4g.
- 1 Conector.

3. COMPOSICIÓN

Peróxido de hidrógeno, fluoruro de sodio, estabilizador, agente neutralizante, espesante, agente estructurante, pigmento azul y agua purificada.

4. MODO DE EMPLEO

El Blanqueador Dental 35% WHITECoffice está indicado para el blanqueamiento de dientes vitales y no vitales que presentan cambios de color extrínsecos crónicos y oscurecimientos que no pueden ser eliminados por procedimientos convencionales. Este producto es para uso exclusivo en consultorios odontológicos. El blanqueador es compatible con fuentes de energía de luz de color azul.

5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

El Blanqueador Dental de Consultorio 35% WHITECoffice tiene como acción la penetración de los agentes blanqueadores en las estructuras dentales y su reacción con las moléculas pigmentadas, oxidándose y fraccionándose en cadenas moleculares cada vez más pequeñas, provocando que los pigmentos incorporados a los tejidos sean eliminados total o parcialmente de la estructura dental por difusión.

6. CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO


- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa.
- Almacenar el producto a temperaturas entre 5°C y 28°C.
- No congelar el producto ni dejarlo expuesto a altas temperaturas.

7. INSTRUCCIONES PARA USO

- Limpiar los dientes y, a continuación, registrar el color inicial mediante una escala Vita o una fotografía.
- Seque bien los dientes y aíselos cuidadosamente con la barrera gingival fotopolimerizable ISOTEC alrededor del tejido gingival y fotopolimerice durante 10 segundos cada diente a blanquear.
- Conectar las dos jeringas del Kit del Blanqueador Dental de Consultorio 35% WHITECoffice, después del acoplamiento completo y seguro mezclar empujando los émbolos alternadamente por hasta 10 veces o hasta que se presente una mezcla homogénea; a continuación explicación del sistema de automezcla.

SISTEMA DE AUTOMEZCLA

Para facilitar la automezcla del peróxido con el espesante se utiliza el sistema de automezcla, en el que se utilizan dos jeringas conectadas por un sistema que permite que el gel pase de una jeringa a la otra, haciendo efectiva la mezcla de las dos fases. Después de mezclado, el gel mezclado debe ser colocado en una única jeringa y utilizado. La figura 01 muestra una ilustración esquemática del funcionamiento de la automezcla.

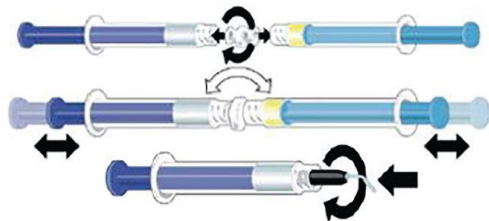

- Iniciar la aplicación del gel blanqueador ya mezclado en toda la cara bucal y proximal de cada diente a blanquear. La capa de gel debe tener 1 mm de espesor.

- El gel blanqueador mezclado debe permanecer en los dientes hasta 30 minutos. Si necesita liberar burbujas de oxígeno, utilice un pincel desechable. Si el paciente manifiesta sensibilidad, retire el producto y evalúe el motivo (fisura, infiltración, dentina expuesta, etc.).

- Transcurridos 30 minutos, retire el gel blanqueador aspirando con una punta de succión adecuada y enjuague abundantemente con agua.
- Retire la barrera gingival fotopolimerizable ISOTEC despegándola con una sonda exploradora. Aplicar el desensibilizante dental durante 10 minutos.

8. CONTRAINDICACIONES

- Realizar un historial detallado del paciente antes de iniciar el tratamiento.
- Manipular el producto solo en un consultorio dental, utilizando guantes y anteojos.
- Evitar el contacto del gel con los tejidos blandos y las encías.
- El producto no se recomienda para personas que hayan sido operadas recientemente de las encías o con inflamación del tejido gingival y personas alérgicas a alguno de sus componentes.
- No se recomienda su uso durante el embarazo, lactancia y para menores de 15 años.
- Producto para uso exclusivo en consultorio odontológico bajo la supervisión de un profesional.
- Producto no estéril.
- Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Se recomienda que el paciente use anteojos protectores.

9. EFECTOS SECUNDARIOS

- La ingestión de grandes cantidades del producto puede provocar náuseas.
- Antes de iniciar el tratamiento, informe a su paciente sobre la posibilidad de padecer sensibilidad dental. Suele ser habitual que aparezca sensibilidad dental durante el tratamiento de blanqueamiento.
- En este caso, si la sensibilidad persiste, tratar los dientes con el Gel Desensibilizante Dental SENSITEC 2%, indicado para sensibilidad de moderada a alta.
- Interrumpir el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.

10. CUIDADOS ESPECIALES

- No ingerir y evitar el contacto con los ojos, la piel y los tejidos bucales.

11. MANIPULACIÓN

- Al manipular el producto, el profesional debe utilizar guantes y anteojos de protección.
- Eliminar el producto de acuerdo con la legislación vigente en el país.

12. INTERACCIONES

- No hay.

