

## INSTRUCCIONES DE USO

---

### CAVITEC OBTURADOR TEMPORAL

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Obturador Temporal CAVITEC es un producto utilizado para el aislamiento transitorio de cavidades en tratamientos restauradores y endodónticos. Al entrar en contacto con la saliva del paciente, la pasta se endurece y sella la cavidad, evitando el contacto del lugar con el medio bucal, pero es fácil de retirar cuando es necesario.

#### 2. PRESENTACIÓN

Pote con 25g

#### 3. COMPOSICIÓN

Óxido de zinc, sulfato de calcio y silicona.

#### 4. MODO DE EMPLEO

El producto está indicado para el aislamiento transitorio de cavidades en tratamientos de restauración y endodoncia.

#### 5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

El Obturador Temporal CAVITEC presenta adhesión a las paredes de la cavidad y un sellado marginal satisfactorio, siendo de suma importancia durante los procedimientos endodónticos, especialmente al realizar la cura de retardo y después de las obturaciones del conducto radicular. Impide la microfiltración de fluidos orgánicos y bacterias del medio bucal, así como el paso de medicamentos intracanales del interior de la cámara pulpar al medio bucal.

#### 6. CONSERVACIÓN/ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa. Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

#### 7. INSTRUCCIONES PARA USO

- Aplicar la cantidad deseada sobre la zona a restaurar provisionalmente, utilizando una espátula.
- La zona debe estar limpia y seca.
- Tiempo de fraguado: 3-5 minutos y tiempo de curado: 15-30 minutos.

#### 8. CONTRAINDICACIONES:

- No permitir que el producto entre en contacto con los ojos o la piel.
- Si entra en contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua y no frotar (Acudir inmediatamente al médico).
- Producto solo para uso profesional, manténgalo alejado de cualquier persona que no haya recibido la formación adecuada.

#### 9. ADVERTENCIAS

- Producto de uso exclusivamente profesional.
- No contiene Eugenol.
- No utilizar como cemento restaurador definitivo.
- Fácil retirada.

#### 10. CUIDADOS ESPECIALES

- Mantener fuera del alcance de los niños

#### 11. MANIPULACIÓN

- El dentista debe ponerse guantes y anteojos protectores durante la aplicación del producto.

#### 12. INTERACCIONES

- No hay.

