

## INSTRUCCIONES DE USO

### DIAMONDTEC

## PASTA PULIDORA DIAMANTADA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Pasta Pulidora Diamantada DIAMONDTEC es una pasta universal, que contiene diamante micronizado de granulación extrafina, utilizada para el acabado final en resinas y para la eliminación de manchas superficiales después del tratamiento de blanqueamiento dental. Proporciona excelentes resultados en el pulido y abrillantado de porcelana, esmalte dental, resinas, composites y otros materiales restauradores. Su fórmula hidrosoluble facilita la lubricación durante el proceso de pulido y eliminación de la pasta. Posee alta dureza, resistencia y viscosidad ideal para trabajos profesionales.

### 2. PRESENTACIÓN

Jeringa con 2,5 g.

### 3. COMPOSICIÓN

Polvo de diamante, Fluoruro sódico, Glicerina vegetal bidestilada, Hidróxido sódico, Carbómero y Agua purificada.

### 4. MODO DE EMPLEO

La Pasta Pulidora Diamantada DIAMONDTEC está indicada para ser utilizada en conjunto con discos de fieltro o discos aterciopelados, lo que potencia su acción en el pulido y acabado final de superficies de materiales restauradores en general.

### 5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

El producto ofrece excelentes resultados en el pulido y abrillantado de porcelana, esmalte dental, resinas, composites y otros materiales de restauración.

### 6. CONSERVACIÓN/ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.

- Protéjalo de la luz solar directa.

- Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

### 7. INSTRUCCIONES PARA USO

- Preparar la zona a pulir dejándola lisa y con la forma final deseada.

- Si es necesario, utilice discos de lija o pasta de grano medio para el acabado previo al pulido.

- Este paso es de fundamental importancia, ya que la obtención de brillo tiene una fuerte dependencia del estado inicial de la superficie.

- Depositar una pequeña cantidad de pasta sobre un disco de fieltro o directamente sobre la superficie de la pieza y proceder al pulido.

- Repetir los procedimientos, si es necesario, hasta obtener el efecto deseado.

### Notas:

a. Utilice movimientos intermitentes a baja velocidad y con poca presión al aplicar el fieltro sobre el diente. De este modo se evita el calentamiento de la superficie.

b. Utilice siempre fieltros nuevos para el pulido. La contaminación de los fieltros con abrasivos de otras pastas puede poner en peligro el éxito del pulido.

### 8. CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en pacientes con cualquier sensibilidad a los componentes de este producto.

### 9. ADVERTENCIAS

- Utilizar bajas revoluciones, ejerciendo poca presión sobre los discos de fieltro, con pasadas intermitentes y en movimientos circulares, evitando así el calentamiento excesivo de la superficie del diente.

### 10. CUIDADOS ESPECIALES

- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad por parte del profesional durante la aplicación del producto.

### 11. MANIPULACIÓN

- Ambiente aséptico.

### 12. INTERACCIONES

- No hay.

