

INSTRUCCIONES DE USO

WHITEChome BLANQUEADOR DENTAL CASERO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Blanqueador Dental Casero WHITEChome es un producto desarrollado para el blanqueamiento de los dientes vitales, de uso doméstico. Con concentraciones de 10%, 16% y 22% de Peróxido de Carbamida, el blanqueamiento dental es eficaz, ya que el peróxido de carbamida se descompone en peróxido de hidrógeno, que penetra en los poros de los dientes y oxida los pigmentos responsables del oscurecimiento. El gel Carbomer de alta viscosidad garantiza una aplicación precisa, evitando fugas de la cubeta. Con pH neutro, el Blanqueador Dental Casero WHITEChome no provoca la descalcificación del esmalte y la dentina. Su fórmula contiene humectantes y un alto contenido en agua para evitar la deshidratación dental. El producto presenta una combinación de Nitrato de Potasio y Fluoruro de Sodio como agentes desensibilizantes, lo que minimiza al máximo la sensibilidad dental durante el blanqueamiento.

2. PRESENTACIÓN

Jeringa con 3g de Blanqueador Dental Casero WHITEChome en concentraciones del 10%, 16% o 22%.

3. COMPOSICIÓN

Peróxido de Carbamida, Agente Neutralizante, Espesante, Agente Remineralizante, Agente Estructurante, Agentes Desensibilizantes y Agua Purificada.

4. MODO DE EMPLEO

El Blanqueador Dental Casero WHITEChome está indicado para uso doméstico, siguiendo la técnica de blanqueamiento dental supervisada por el dentista. Es eficaz en el blanqueamiento de dientes vitales, eliminando manchas causadas por factores congénitos, sistémicos, farmacológicos, traumáticos y relacionados con el envejecimiento. Proporciona excelentes resultados en el tratamiento de las manchas debidas a la fluorosis, especialmente las manchas marrones. También se recomienda para manchas de tetraciclina de primer y segundo grado.

El Blanqueador Dental Casero WHITEChome, con una concentración del 10%, está indicado para manchas naturales relacionadas con la edad, el tabaquismo o cuando existe una mayor sensibilidad dental. Mientras que las concentraciones del 16% y 22% se recomiendan para manchas más antiguas y pronunciadas, que presentan dificultades de eliminación o cuando se buscan resultados más rápidos.

5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

El Blanqueador Dental Casero WHITEChome tiene como acción la penetración de los agentes blanqueadores en

las estructuras dentales y su reacción con las moléculas pigmentadas, oxidándose y fraccionándose en cadenas moleculares cada vez más pequeñas, provocando que los pigmentos incorporados a los tejidos se eliminen total o parcialmente de la estructura dental por difusión.

6. CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa.
- Almacenar el producto a temperaturas entre 5°C y 28°C.
- Y no congele el producto ni lo deje expuesto a altas temperaturas.

7. INSTRUCCIONES PARA USO

Inicialmente, se recomienda que un profesional de la odontología realice una profilaxis y registre el color de los dientes del paciente, mediante una fotografía o una escala de colores Vitta. Antes de cada aplicación del producto, realizar una higiene completa y eficaz de los dientes con cepillo e hilo dental, evitando cepillados agresivos en las encías. Los residuos de alimentos pueden comprometer el resultado del blanqueamiento.

- Una vez preparada e higienizada la cubeta WHITEC, retire la tapa de la jeringa y acople la punta del aplicador para colocar de una a tres gotas de gel blanqueador WHITEChome en cada compartimento de la cubeta correspondiente a los dientes que desea blanquear.
- A continuación, debe colocarse la cubeta WHITEC en la boca para que los dientes entren en contacto con el gel. Retire el gel sobrante si lo hay.
- Lleve las cubetas WHITEC, una a una, a la boca y presiónelas con los dedos pulgar e índice contra los dientes para que el gel se extienda y los cubra a todos.
- Retire el gel sobrante con el dedo índice. Después de utilizar la cubeta WHITEC cargada con gel durante el tiempo recomendado (de ½ hora a 2 horas diarias, o el tiempo que recomiende el dentista), retire la cubeta WHITEC.
- Limpie la cubeta WHITEC con un cepillo de dientes y agua corriente. Séquela y guárdela en un lugar adecuado.
- Enjuáguese la boca con agua y vuelva a cepillarse los dientes si es necesario.
- Después de retirar la cubeta WHITEC, deberá limpiarla a fondo y guardarla con los compartimentos dentales abiertos hacia abajo para que no retenga agua. Este producto puede utilizarse durante el día, siempre que no sea inmediatamente después de una comida. En este caso, el producto debe permanecer en contacto con los dientes entre 1 y 2 horas. Otra opción es dejarlo actuar durante el sueño, un periodo aproximado de 8 horas.



INSTRUCCIONES DE USO

WHITEChome **BLANQUEADOR DENTAL CASERO**

En ambos casos, se recomienda utilizar el gel blanqueador de forma continuada durante 15 a 21 días, bajo la supervisión del dentista.

Debe tenerse especial cuidado de no masticar ni tragar mientras la cubeta esté en la boca.

8. CONTRAINDICACIONES

- No utilice el líquido aisladamente.
- Este es un producto que siempre debe ser indicado y supervisado por un dentista.
- Antes de iniciar el tratamiento, informe a su paciente sobre la posibilidad de presentar sensibilidad dental.
- El producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas y/o en período de lactancia y en pacientes menores de 14 años.
- Evitar la ingestión intencionada y excesiva del producto.
- No utilizar en pacientes con sensibilidad a los componentes de este producto. Los pacientes con antecedentes de alergia a los componentes de esta formulación deben consultar a un especialista antes de iniciar el tratamiento.
- Evite fumar durante el periodo de tratamiento y no fume inmediatamente después de retirar la cubeta.
- Durante el tratamiento, el paciente debe evitar ingerir bebidas, frutas y productos ácidos para evitar la sensibilidad.
- Evitar el consumo, durante el tratamiento, de productos que contengan colorantes fuertes como: café, chocolate, refrescos, vinos, remolacha, etc., para no comprometer el proceso de blanqueamiento.
- Aconsejar al paciente que vuelva a la consulta para un tratamiento de seguimiento después de una semana (7 días), con el fin de evaluar y garantizar la eficacia de los resultados del blanqueamiento dental hasta el final del tratamiento.
- Si surge algún problema, interrumpa el tratamiento e informe a su dentista.
- En caso de ingestión accidental de una gran cantidad de producto, acuda a un médico.
- El producto no es inyectable. No reutilice el envase.

9. EFECTOS SECUNDARIOS

- La ingestión de grandes cantidades del producto puede provocar náuseas.
- Antes de iniciar el tratamiento, informe a su paciente sobre la posibilidad de sensibilidad dental. Es frecuente experimentar sensibilidad dental durante el tratamiento de blanqueamiento dental.
- En este caso, si la sensibilidad persiste, trate los dientes con gel desensibilizante SENSITEC 0,2% indicado para

sensibilidad de moderada a baja o gel desensibilizante SENSITEC 2% indicado para sensibilidad de moderada a alta.

- El exceso de gel en la cubeta puede dejar una ligera irritación en el tejido gingival, por lo que se recomienda retirar siempre el exceso siguiendo el manual de instrucciones del paciente.

10. CUIDADOS ESPECIALES

- Interrumpir el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.

11. MANIPULACIÓN

- Ambiente aséptico.

12. INTERACCIONES

- No hay

