

INSTRUCCIONES DE USO

WHITEC LÁMINAS PARA CUBETAS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La lámina para cubetas dentales WHITEC, fabricada en EVA, está indicada para la fabricación de cubetas, también llamadas moldes o férulas dentales de ortodoncia.

2. PRESENTACIÓN

En forma redonda y cuadrada
Tres grosores: 1 mm, 2 mm y 3 mm.

3. COMPOSICIÓN

Copolímero de etileno y acetato de vinilo.

4. MODO DE EMPLEO

Adecuadas para fabricar cubetas WHITEC para blanqueamiento dental, control del bruxismo o como protectores bucales o férulas para tratamientos dentales.

5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

Para la fabricación de moldes.

6. CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa.
- Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

7. INSTRUCCIONES PARA USO

- Moldear la arcada del paciente.
- Rellenar el molde con yeso, obteniendo el modelo.
- La preparación de alivio en la cubeta es optativo.
- Acomodar la lámina de EVA en el plastificador al vacío.
- Colocar el modelo de yeso centrado bajo la lámina y encender el plastificador para iniciar el calentamiento de la lámina.
- Cuando la lámina muestre un abultamiento que demuestre su ablandamiento, bájela rápidamente sobre el modelo y encienda el vacío durante 10 a 15 segundos.
- La lámina se ajustará a los contornos del modelo.
- Cuando la cubeta se haya enfriado, recorte el material sobrante.

8. CONTRAINDICACIONES

- Durante el proceso de moldeo, las láminas pueden calentarse y provocar quemaduras en la piel si se tocan.

- Evite tocar las láminas durante o inmediatamente después del proceso.

- No utilice el producto si el embalaje se muestra dañado.

- No exponga el producto a un calor excesivo.

9. ADVERTENCIAS

- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

- Producto de un solo uso, puede moldearse una sola vez.

- En caso de anomalía en el moldeo, desechar el producto.

- Producto no estéril.

- Producto de uso restringido a profesionales de la odontología (cirujanos dentistas y protésicos dentales).

10. CUIDADOS ESPECIALES

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

11. MANIPULACIÓN

- Ambiente aséptico.

12. INTERACCIONES

- No hay.

