

INSTRUCCIONES DE USO

CAITHEC **FLÚOR EN GEL** Neutro

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El flúor en gel CAITHEC se utiliza después del procedimiento de asepsia dental realizado en el consultorio odontológico, su función principal es liberar flúor lo que ayuda en el proceso de remineralización del tejido dental.

2. PRESENTACIÓN

Frasco con 200 ml

3. COMPOSICIÓN

Fluoruro sódico, Carbómero, Glicerina bidestilada, Sacarina sódica, Propilenglicol, Aroma, Colorante azul, Agua purificada.

4. MODO DE EMPLEO

Indicado para la prevención de la caries, el gel fluorado CAITHEC neutro es de rápida aplicación. Además de ser seguro, su aplicación es muy práctica. Su grado de viscosidad mantiene el gel en la cubeta WHITEC sin gotear. Bajo presión, su viscosidad disminuye y el flúor penetra en las zonas interproximales.

5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

Actúa frenando la degradación del esmalte y acelerando el proceso natural de remineralización de los filamentos de dicho esmalte.

6. CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa.
- Almacenar el producto a temperaturas entre 5°C y 28°C.

7. INSTRUCCIONES PARA USO

- Después de la limpieza, seque bien los dientes y aplique el gel con la ayuda de una cubeta.
- Deje la cubeta WHITEC en contacto con la superficie dental durante al menos 40 segundos, procurando que el paciente no trague el producto (utilice el succionador si es necesario).

- Retire la cubeta WHITEC y el gel sobrante y pida al paciente que escupa los restos que queden en la boca.
- Indique al paciente que no coma ni beba nada durante al menos 30 minutos después de la aplicación.

8. CONTRAINDICACIONES

- Evitar la ingestión deliberada y excesiva del producto.
- No utilizar en pacientes con cualquier sensibilidad a los componentes de este producto.
- Si ocurre algún problema durante o después de la aplicación, informe a su dentista.
- Mantener siempre alejado del calor y/o de la luz solar.
- En caso de ingestión accidental de una gran cantidad de producto, acuda a un médico.
- El producto no es inyectable.
- No reutilice el envase.

9. ADVERTENCIAS

- La ingestión de grandes cantidades del producto puede provocar náuseas.
- Lea siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
- Solo para uso profesional.

10. CUIDADOS ESPECIALES

- Suspenda el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.
- Al tratarse de un producto compuesto por flúor, no debe ingerirse.

11. MANIPULACIÓN

- Ambiente aséptico.

12. INTERACCIONES

- No hay.

