

INSTRUCCIONES DE USO

ATAKTEC ACONDICIONADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Ácido ATACKTEC 37% es un gel acondicionador a base de ácido fosfórico de baja viscosidad con propiedades tixotrópicas. Tiene coloración azul para facilitar la visualización y el control durante la aplicación. Es hidrófilo y se elimina fácilmente después del grabado. No gotea de la zona aplicada.

2. PRESENTACIÓN

Jeringa con 2,5 ml

3. COMPOSICIÓN

Ácido fosfórico, polietilenglicol, agua purificada y colorante azul.

4. MODO DE EMPLEO

Indicado para esmalte y dentina, el acondicionador Ácido 37%, además de limpiar la superficie dental, promueve el aumento del área superficial proporcionando mejor adhesión y retención de los sistemas adhesivos en la superficie dental.

5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

El Ácido es un gel que contiene Ácido Fosfórico a una concentración del 37%, que reacciona con la superficie del esmalte o de la dentina para formar sales solubles de Fosfato de Calcio. Dichos fosfatos solubles se eliminan y así la superficie queda libre de partículas sueltas o adsorbidas, presentando un relieve más rugoso (especialmente en el caso de la dentina, donde los túbulos dentinarios quedan desobstruidos y expuestos). La limpieza asociada a las condiciones de rugosidad permite mejorar el comportamiento de los adhesivos de la superficie grabada. Con la superficie limpia y bien expuesta, el adhesivo penetra más fácilmente.

6. CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa.
- Conservar en lugar seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

7. INSTRUCCIONES PARA USO

- Promover la profilaxis, lavar y secar bien la región a acondicionar.
- Aplicar el ácido en la región a grabar y dejar actuar durante 30 segundos en el esmalte y 15 segundos en la dentina.
- Los dientes fluorados pueden necesitar una segunda aplicación.
- Después del grabado, lavar la superficie con abundante agua y secar con suaves chorros de aire exentos de aceite.

8. CONTRAINDICACIONES

- Contraindicado para personas con sensibilidad observada a cualquiera de los componentes del producto.

9. ADVERTENCIAS

- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para uso exclusivo del cirujano dentista.

10. CUIDADOS ESPECIALES

- Evitar el contacto con la piel, los tejidos bucales y los ojos, si esto ocurre enjuagar inmediatamente con agua corriente.

11. MANIPULACIÓN

- Cuando manipule el producto, el profesional debe utilizar guantes y anteojos de protección.
- Desechar el producto de acuerdo con la legislación vigente en el país.

12. INTERACCIONES

- No hay.

