

INSTRUCCIONES DE USO

CAITHEC PASTA PROFILÁCTICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Pasta Profiláctica CAITHEC es una pasta dental abrasiva con acción antiséptica y blanqueadora que se puede utilizar en la profilaxis dental, ya que no interfiere con el grabado ácido.

2. PRESENTACIÓN

Tubo con 90 g

3. COMPOSICIÓN

Carbonato cálcico, cuarzo, sulfato sódico, sílice, espesante, edulcorante, conservante, aroma, agua purificada, glicerina, fluoruro sódico.

4. MODO DE EMPLEO

La Pasta Profiláctica CAITHEC es indicada para procedimientos de profilaxis, auxiliando en la remoción de manchas, residuos y placa de la superficie dentaria.

5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

La pasta profiláctica CAITHEC está clasificada como un producto médico invasivo aplicable al orificio corporal (medio bucal) para uso transitorio.

6. CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa.
- Almacenar el producto a temperaturas entre 5°C y 28°C.

7. INSTRUCCIONES PARA USO

- Aplique una pequeña cantidad de la Pasta Profiláctica CAITHEC con la copa de goma sobre la superficie de los dientes, utilizando una rotación baja hasta eliminar completamente las manchas y la placa.
- A continuación, enjuagar.

8. CONTRAINDICACIONES

- Utilizar baja velocidad, aplicando poca presión sobre los discos de fieltro, con pasadas intermitentes y en movimientos circulares, evitando así el calentamiento excesivo de la superficie dental.

No utilizar en pacientes con cualquier sensibilidad a los componentes de este producto;

- Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.

9. ADVERTENCIAS

- Uso restringido a profesionales especializados en odontología, de acuerdo con la legislación local.

- Seguir estrictamente los procedimientos indicados en las Instrucciones de Uso.

- Se debe tener cuidado durante el procedimiento para evitar la abrasión excesiva de cualquier material restaurador presente, ya que estos son susceptibles al desgaste debido a su baja dureza.

- Aplicar con cuidado en las zonas con la dentina expuesta.

- El uso diario del producto puede provocar el desgaste del esmalte.

- El uso en niños menores de 2 años puede provocar fluorosis dental debido a la ingestión accidental de este producto.

- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

10. CUIDADOS ESPECIALES

- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad por parte del profesional durante la aplicación del producto.

11. MANIPULACIÓN

- Ambiente aséptico.

12. INTERACCIONES

- No hay.

