

## INSTRUCCIONES DE USO

# CAITHEC ACONDICIONADOR ÁCIDO FLUORHÍDRICO 10% Porcelana

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Acondicionador de Porcelana CAITHEC es un gel de baja viscosidad que contiene 10% de Ácido Fluorhídrico. Es indicado para uso como agente acondicionador en procedimientos relacionados a la porcelana dental. Su formulación tiene afinidad con el agua, lo que facilita su remoción después del acondicionamiento. El producto es coloreado para facilitar el control durante la aplicación.

### 2. PRESENTACIÓN

Jeringa con 2,5 ml.

### 3. COMPOSICIÓN

Ácido fluorhídrico, Agua purificada, Carbómero y Colorante.

### 4. MODO DE EMPLEO

El Acondicionador de Porcelana CAITHEC está recomendado para el grabado ácido de prótesis totalmente cerámicas para su cementación con cementos de resina CAITHEC. También se indica para el grabado de fragmentos cerámicos para la adhesión o reparación con resinas compuestas. Permite un aumento de la resistencia y adhesión de la porcelana.

### 5. ACCIÓN DEL PRODUCTO

El Acondicionador de Porcelana CAITHEC es un gel a base de Ácido Fluorhídrico que, cuando aplicado a la porcelana dental, promueve una penetración profunda y extensiva en la superficie de la porcelana, proporcionando una mejor adhesión de la porcelana dental con los materiales de resina utilizados para la cementación.

### 6. CONSERVACIÓN/ ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en su envase siempre cerrado.
- Proteger de la luz solar directa.
- Conservar en lugar seco a temperatura ambiente (5°C a 28°C).

### 7. INSTRUCCIONES PARA USO

#### a. Cementación de restauraciones indirectas o carillas con cementos de resina:

- Promover la preparación de la superficie dental de acuerdo con las técnicas recomendadas por el agente cementante.
- Promover el grabado ácido utilizando el Acondicionador de Porcelana CAITHEC de toda la superficie interna de la restauración o carilla por el tiempo recomendado de acuerdo con la clasificación del material.
- Lavar y secar cuidadosamente.
- Aplicar el Silano CAITHEC sobre la superficie grabada usando un pincel, esperar 1 minuto y aplicar una nueva capa.
- Aplicar el cemento de resina CAITHEC de acuerdo con las instrucciones del producto.

#### b. Reparaciones de cerámica con composites:

- Promover la remoción de bordes friables y desbastar la superficie con puntas de diamante.
- Promover la preparación de la superficie con ácido fluorhídrico CAITHEC por el tiempo recomendado de acuerdo con la clasificación del material.
- Enjuagar y secar bien.
- Con la ayuda de un pincel, aplicar el agente de unión sobre la superficie grabada, esperar 1 minuto y aplicar una nueva capa.

- Aplicar el sistema adhesivo dentinario CAITHEC universal seleccionado y promover la fotoactivación según las instrucciones del fabricante.

- Promover la reparación con un composite adaptándolo a los márgenes y evitando sobrecontornos.

#### c. Reparaciones de cerámica/ cerámica:

- Promover el acondicionamiento de la superficie con ácido fluorhídrico CAITHEC por el tiempo recomendado de acuerdo con la clasificación del material

- Lavar y secar bien.

- Con la ayuda de un pincel aplicar el agente de unión sobre las superficies grabadas, esperar 1 minuto y aplicar una nueva capa.

- Aplicar el sistema adhesivo dentinario convencional CAITHEC seleccionado promoviendo la fotoactivación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Promover la unión de las dos partes con ligera presión y fotoactivar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Si falta cerámica, reconstruir la zona fracturada con composite.

#### d. El tiempo del Acondicionador de Porcelana difiere según la clasificación del material:

- Porcelanas feldespáticas: acondicionar de 1 a 2 minutos.
- Vidrios con tratamiento cerámico mecanizados: acondicionar durante 1 minuto.
- Prensados/inyectados: acondicionar durante 30 segundos.

### 8. CONTRAINDICACIONES

- Contraindicado para personas con sensibilidad declarada a cualquiera de los componentes del producto.

### 9. ADVERTENCIAS

- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar en la cavidad bucal.
- Para uso exclusivo del cirujano dentista.

### 10. CUIDADOS ESPECIALES

- Evite el contacto con la piel, los tejidos bucales y los ojos, si esto ocurre enjuague inmediatamente con agua corriente.

### 11. MANIPULACIÓN

- Al manipular el producto, el profesional debe utilizar guantes y anteojos de protección.
- Eliminar el producto de acuerdo con la legislación vigente en el país.

### 12. INTERACCIONES

- No hay.

